


AREE DOVE IL DETACHOL VIENE PIÙ COMUNEMENTE USATO



RIMOZIONE DI STRISCETTE ADESIVE PER FERITE

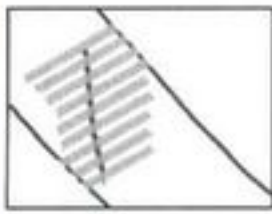

RIMOZIONE DI MEDICAZIONI SU FERITE



RIMOZIONE DI MEDICAZIONI PER CATETERI VENOSI



RIMOZIONE DI MEDICAZIONI PER TUBI ENDOTRACHEALI

FERNDALE
LABORATORIES INC.

Rappresentante Europeo Autorizzato

FERNDALE LABORATORIES srl

Sede Legale: Loc. Pian dei Mori - Via Piave, 6 int. 1 - 53018 Sovicille (Siena)

Tel. 0577/349207 - Fax 0577/349386 - E-mail: ferdalelabs@virgilio.it

C.C.L.A.A. di Siena n. 97849 - Tribunale di Siena n. 9770 - Capitale Sociale Euro 41.316,52 i.v.

Codice Fiscale/Partita IVA e Numero Iscrizione R.I. di Siena 00881410526

Detachol® è un marchio registrato da Ferndale IP, Inc.

Ed. 05/2010

detachol®

ASPORTATORE DI ADESIVO

Quando c'è bisogno di rimuovere rapidamente, con sicurezza, completezza e in maniera indolore.



Detachol è un asportatore d'adesivo non irritante, usato per rimuovere medicazioni, cerotti e residui di vario tipo dalla pelle.

detachol®
ASPORTATORE DI ADESIVO

3 SEMPLICI PASSI PER UNA RIMOZIONE INDOLORE

Collocare la fiala nella confezione individuale blister-pak su una superficie dura (con l'etichetta orientata verso il basso). Applicare una pressione delicata sulla fiala attraverso la confezione blister-pak, in modo da schiacciare l'ampolla interna, liberando il Detachol. A titolo cautelativo, non schiacciare l'ampolla più di una volta.

Rimuovere la fiala adottando tecniche sterili, strappando all'indietro la chiusura ed estraendo la fiala stessa dalla confezione blister-pak.

Sollevare delicatamente l'angolo della medicazione ed applicare il Detachol premendo leggermente la fiala contro un angolo dell'adesivo. Una volta imbevuto, tirare gentilmente la medicazione. Continuare a schiacciare la fiala, tirando via.

Continuare l'applicazione fino alla completa rimozione della medicazione. Pulire l'area con sapone delicato ed acqua. Evitare il contatto con le escoriazioni o ferite cutanee.

Avvertenza: Solo per uso esterno.

Contenuto: Un prodotto appositamente raffinato d'idrocarburi di paraffina.

Attenzione: Infiammabile. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se ingerito, non indurre il vomito. Richiedere l'immediato intervento di un medico.



1 ROTTURA



2 RIMOZIONE



3 APPLICAZIONE

ISTRUZIONI PER L'USO