


AREE DOVE IL MASTISOL VIENE PIÙ COMUNEMENTE USATO

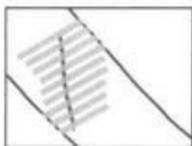

STRISCETTE ADESIVE PER FERITE



PLACCHE ILEO-COLOSTOMICHE



MEDICAZIONI ACCESSI VENOSI



TUBI ENDOTRACHEALI



Rappresentante Europeo Autorizzato

FERNDALE LABORATORIES srl

Sede Legale: Loc. Pian dei Mori - Via Piave, 6 int. 1 - 53018 Sovicille (Siena)

Tel: 0577/349207 - Fax 0577/349386 - E-mail: ferndalelabs@virgilio.it

C.C.I.A.A. di Siena n. 97849 - Tribunale di Siena n. 9770 - Capitale Sociale Euro 41.316,52 I.v.

Codice Fiscale/Partita IVA e Numero Iscrizione R.I. di Siena 00881410526

Mastisol® è un marchio registrato da Ferndale IP, Inc.

Ed. 05/2010

mastisol®

ADESIVO MEDICALE

Quando c'è bisogno di stabilità, garanzia, facilità e sicurezza.



Mastisol è un adesivo liquido medicale usato per garantire l'integrità di medicazioni, cerotti e alcuni dispositivi per un lungo periodo.

mastisol®


ADESIVO MEDICALE



❶ ROTTURA



❷ RIMOZIONE

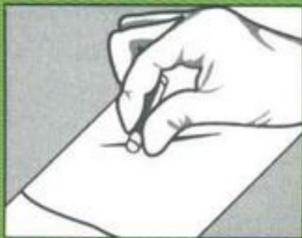

❸ APPLICAZIONE

3 SEMPLICI PASSI PER UNA POTENZA CONTENITIVA SUPERIORE

Pulire ed asciugare l'area dove verrà applicato il Mastisol. Collocare la fiala nella confezione individuale blister-pak su una superficie dura (con l'etichetta orientata verso il basso). Applicare una pressione delicata sulla fiala attraverso la confezione blister-pak, in modo da schiacciare l'ampolla interna, liberando il Mastisol. A titolo cautelativo, non schiacciare l'ampolla più di una volta.

Rimuovere la fiala adottando tecniche sterili, strappando all'indietro la chiusura ed estraendo la fiala stessa dalla confezione blister-pak.

Applicare il Mastisol, con attenzione, comprimendo la fiala gentilmente, sull'area che verrà coperta da un cerotto o bendaggio. Evitare di entrare in contatto con il tessuto della ferita. Lasciar asciugare il Mastisol per 20-30 secondi. Adottando tecniche convenzionali, posizionare il bendaggio o il cerotto a contatto con il Mastisol.

Avvertenza: Solo per uso esterno.

Contenuto: Mastice di gomma, storace liquido, salicilato di metile e alcool (SDA).

Attenzione: Infiammabile. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI PER L'USO