

detachol®

PREPARATO PER LA RIMOZIONE DELL'ADESIVO



PRIVO DI LATTICE

FLACONE DA 15 mL NETTI

AVVERTENZA - SOLO PER USO ESTERNO

ISTRUZIONI PER L'USO DEL PRODOTTO:


Impregnare



Applicare



Rimuovere

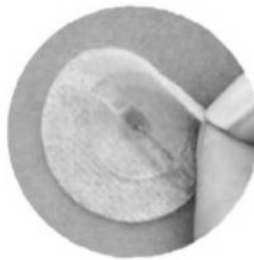

Pulire



ISTRUZIONI: impregnare un batuffolo di cotone o un bastoncino ovattato con Detachol®.
Sollevare delicatamente l'angolo del materiale incollato ed applicare Detachol® verso il lato adesivo, premendo leggermente allo stesso tempo. Evitare il contatto con la cute lesa.
Continuare l'applicazione fino alla completa rimozione dell'adesivo. Pulire l'area con alcool o acqua e sapone.
Pulire il Detachol® in eccesso, evitandone il contatto prolungato con la pelle.

PERICOLO! NOCIVO SE INGERITO

**ATTENZIONE: LIQUIDO INFIAMMABILE. TENERLO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
NON ESPLOSIVO.**

CONTENUTO: un prodotto appositamente raffinato di idrocarburi paraffinici.

ATTENZIONE: contiene distillati del petrolio. Evitare il contatto con la cute lesa. Se ingerito, non provocare il vomito. Rivolgersi immediatamente ad un medico.

Non contiene acetone, benzene, cloroformio o etere. Detachol® non produce prurito.