

SCHEDA TECNICA - MASTISOL® Liquido Adesivo

Mastisol è un adesivo medico liquido utilizzato per assicurare medicazioni, cerotti e alcuni dispositivi medici. Mastisol garantisce l'integrità di queste medicazioni e dispositivi per un lungo periodo di tempo. Viene usato frequentemente per il fissaggio delle "Striscie per la Chiusura di Ferite", "Teli Operatori per Campi Sterili"; inoltre per il fissaggio della medicazione su "Accessi Vascolari", "Tubi Endotracheali", "Sondini Naso-Gastrici", "Sacche Ileo-Colostomiche", "Cateteri Foley", "Drenaggi Toracici". Riduce il rischio di dislocamento delle medicazioni ed anche il rischio di infezioni creando una barriera oclusiva duratura. E' Clinicamente testata la sua capacità di incrementare la tenuta di varie medicazioni. Riduce i tempi associati a cambi di medicazione non pianificati. Il Mastisol è compatibile con l'uso sulla pelle della Clorexidina Gluconato e non influisce sulla sua efficacia antisettica.

<u>Prodotto da:</u>	Ferndale Laboratories Inc. 780 West Eight Mile Road, Ferndale, Michigan 48220 - USA.
<u>Certificato da:</u>	INTERTEK SEMKO AB Certification Authority MDD Torshamnsgatan 43 Box 1103 - SE-164 22 KISTA (Svezia)
<u>Classe d'Appartenenza:</u>	DISPOSITIVI MEDICI – Classe I Sterile – CE 0413
<u>Posizione Ministeriale Attribuita:</u>	DM N. 15299 – Classificazione CND H90010102
<u>Specifiche di Confezionamento:</u>	Cod. 0496-0523-44 - Confezioni da 48 Fiale Monouso Sterili da 0,66ml.
<u>Riferimenti Indicativi di Produzione:</u>	Denominazione del Prodotto; Codice di Riferimento; Lotto di Riferimento; Data di Scadenza; Indirizzo del Rappresentante Europeo Autorizzato.
	<u>Altre informazioni:</u> Sterilizzato ad Ossido d'Etilene (solo per le Fiale); Fiale Individuali (Monouso); Solo l'Applicatore Esterno è Sterile. Non si garantisce la Sterilità del Liquido; Avvertenza Solo per Uso Esterno; Nocivo se Ingerito; Evitare il Contatto con gli Occhi; Tenere fuori dalla portata dei Bambini; Infiammabile; Per maggiori dettagli, leggere l'Etichetta nel Cartone.
<u>Composizioni:</u>	Mastice di Gomma, Storace Liquido, Salicilato di Metile, Alcol Denaturato 23-A.
<u>Proprietà:</u>	Non idrosolubile, trasparente, non macchia la cute, con funzione protettiva, evita infezioni da occlusione, non contiene Lattice, Ftalati.
<u>Avvertenze:</u>	Raramente può causare reazioni localizzate di tipo irritante o allergico (es. bruciore, eruzioni cutanee e vesciche) in pazienti che hanno già evidenziato sensibilità al benzoino o ad altri componenti adesivi.
<u>Sterile (Cod. 0496-0523-44):</u>	Ossido d'Etilene.
<u>Durata Massima del Prodotto:</u>	5 anni dalla data di produzione con confezione integra per le fiale.
<u>Modalità di Conservazione:</u>	In Ambiente pulito, asciutto ed al riparo da raggi solari. Temperatura Ambiente.
<u>Modalità di Smaltimento:</u>	Come un qualsiasi altro “ Rifiuto Ospedaliero ”.

FERNDALE LABORATORIES srl
Elena Franci – Amministratore Unico

importatore per l'Italia:

FERNDALE LABORATORIES s.r.l.

Sede Legale: Loc. Pian dei Mori - Via Piave, 6 int. 1 - 53018 Sovicille (SI) - Tel. 0577/349207 - Fax 0577/349386 - Email ferndale.labs@gmail.com
C.C.I.A.A. di Siena n. 97849 - Tribunale di Siena n. 9770 - Cap. Soc. Euro 41.316,52 i.v. - Cod. Fisc./Part. IVA e Numero Iscrizione R.I. di Siena 00881410526